

# ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ



ИННОВАЦИОННЫЙ  
МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
И КОРРЕКЦИИ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА

аппараты

картриджи


мезококтейли



# ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ (МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ ТЕРАПИЯ)

## Micro Needle Therapy



Метод, сочетающий в себе особенности техники НАППАЖ в классической мезотерапии и возможности микроигльчатой терапии. Для процедур используют стерильные картриджи с вертикальной подачей игл, различной скоростью и глубиной проколов.

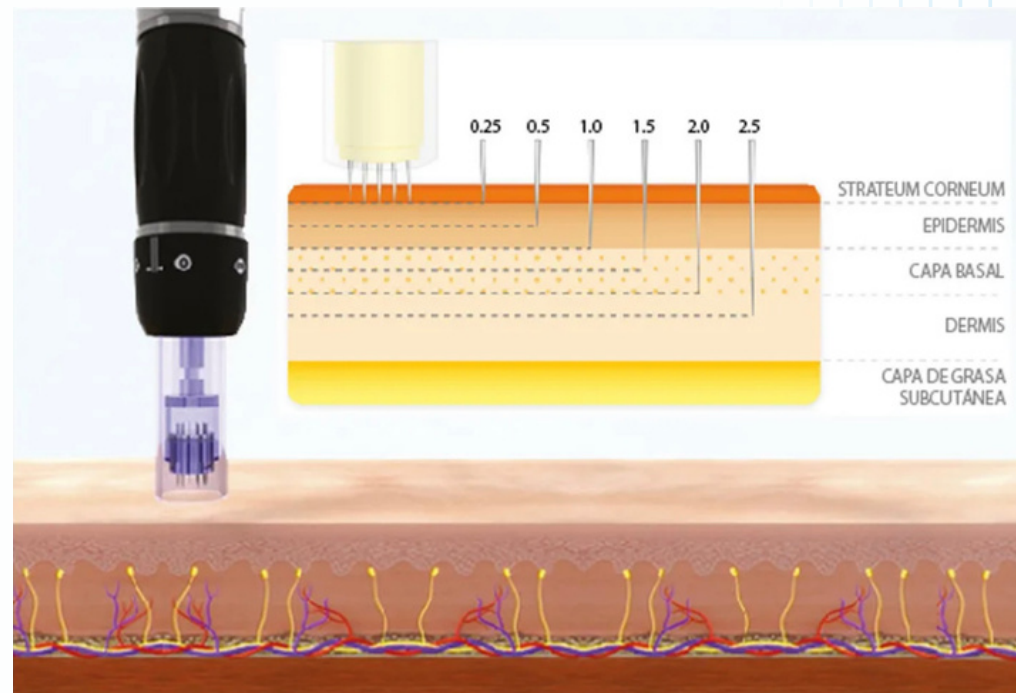

### ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

- **Вертикальная ориентация игл** - проколы лучшего качества, чем у мезороллера
- **Одноразовые сменные картриджи** - безопасность процедуры
- **Регулируемая длина иглы от 0,25 до 3,0 мм** - работа на всех зонах, на лице, теле и волосах
- **Регулируемая скорость микропроколов** - максимальный комфорт для пациентов
- **Высокая плотность проколов** - гораздо больше, чем при классической мезотерапии и применении мезороллера
- **Малая болезненность процедуры** - большинство процедур можно проводить без анестезии

### ОТЛИЧИЕ ФРАКЦИОННЫХ МИКРОПРОКОЛОВ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЗОРОЛЛЕРА

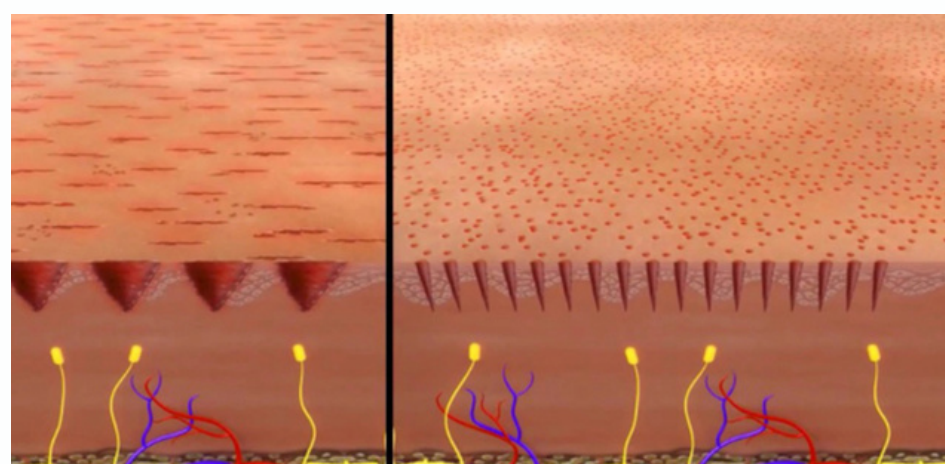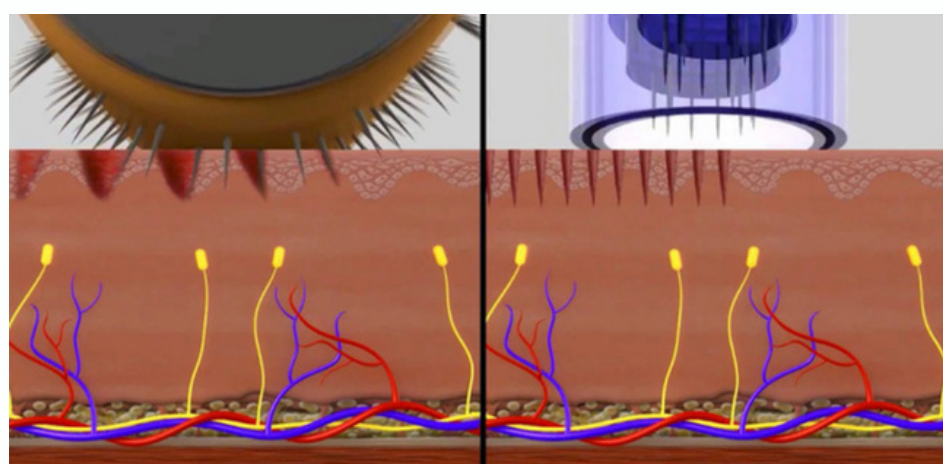

Фракционная микроигльчатая терапия позволяет в максимально короткие сроки проводить обработку большой площади кожи. При этом регуляция длины иглы на разных участках дает возможность проводить комплексную микроигльчатую терапию.



Регулировка длины иглы  
от 0,25 до 3.0 мм



Стерильные картриджи  
на 12 мм или 36 игл  
с лазерной заточкой



Улучшение внешнего вида  
кожи после первых процедур

# НАЗНАЧЕНИЕ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

Правильно выбрав мезококтейль и технику работы, можно решать разнообразные эстетические задачи:

- Уменьшение морщин, в том числе глубоких и мимических
- Разглаживание и оживление кожи (биоревитализация сыворотками гиалуроновой кислоты)
- Глубокое увлажнение лица и век
- Подтяжка кожи лица, шеи, декольте, век
- Питание и восстановление уставшей кожи с начальными возрастными изменениями
- Поддержка кожи при климаксе и гормональных стрессах
- Выравнивание рельефа кожи, стягивание пор, сглаживание постакне
- Уменьшение растяжек и рубцов
- Восстановление и стимуляция роста волос
- Уменьшение жировых складок, в том числе «второго подбородка»
- Уменьшение пигментаций
- Оздоровление жирной и проблемной кожи


## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Нарушения свертываемости крови
- Злокачественные новообразования
- Невусы, бородавки, папилломы обходим
- Розацеа
- Острые инфекционные заболевания
- Лихорадочные состояния
- Тромбофлебит (в зоне воздействия)
- Острые гнойные воспалительные процессы
- Склонность к образованию гипертрофических и келоидных рубцов
- Беременность, лактация

## КАК ВЫБРАТЬ ДЛИНУ ИГЛЫ?

Вы сможете регулировать длину иглы во время процедуры:

- от 0,25 мм для области век
- до 2,5-3,0 мм для работы с целлюлитом и рубцами на теле

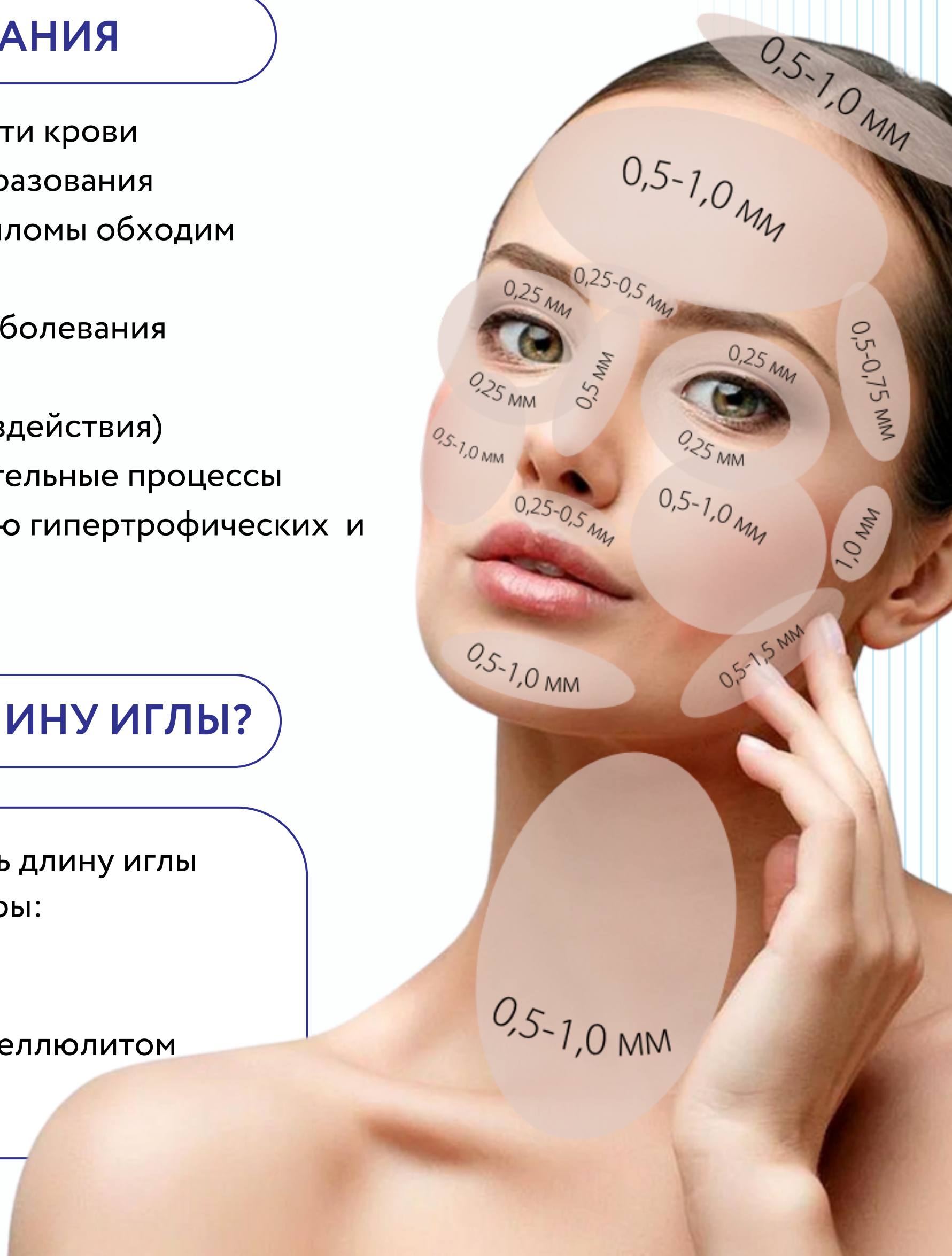

# АППАРАТЫ

## ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ



**DERMAPEN  
DR. PEN ULTIMA A 1**

Скорость до 7200 проколов в минуту  
5 режимов  
Регулировка длины от 0,25 - 3,0 мм  
Металлический корпус  
Работа от сети



**DERMAPEN MINI  
ELECTRIC MESO PEN**

Скорость до 5500 проколов в минуту 5 режимов  
Регулировка длины от 0,25 мм до 2 мм  
Пластиковый корпус  
Работа от встроенного аккумулятора с автоподачей



**DERMAPEN DR.PEN A6S**

Скорость до 18000 проколов в минуту 6 режимов  
Регулировка длины от 0,25-2,5мм  
Металлический корпус  
Работа от встроенного аккумулятора и от сети. В комплекте 3 аккумулятора

# КАРТРИДЖИ



Длина игл: 0,25-2,5 мм  
Материал игл: хирургическая сталь.  
Заточка игл: акупунктурная.  
Зона применения: лицо, тело, кожа головы.  
Для аппаратов Dr. Pen A6s



Длина игл: 0,2 мм  
Материал игл: хирургическая сталь.  
Заточка игл: акупунктурная.  
Зона применения: лицо, тело, кожа головы.  
Для аппаратов Dr. Pen A6s



Длина игл: 0.25-2.00 мм  
Материал игл: хирургическая сталь  
Заточка игл: акупунктурная  
Зона применения: лицо, тело, кожа головы  
Для аппарата Mini-Electric Dermapen



Длина игл: до 3 мм  
Материал игл: медицинская сталь.  
Заточка игл: акупунктурная.  
Зона применения: лицо, тело, волосы.  
Для аппаратов Dr. Pen



## КУРС (НАЗНАЧЕНИЕ)

### КЛАССИЧЕСКИЙ МИКРОНИДЛИНГ

- Работа до 1,0 мм
- Курс 10 процедур, 1 раз в неделю
- Курс 15 процедур, 1 раз в неделю (с аппликационной анестезией)

### УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВ И РАСТЯЖЕК

- Частота - 1 раз в 2-4 недели, в зависимости от глубины работы
- Курс 8-15 процедур

### РУБЦЫ ПОСТАКНЕ


- Частота - при работе до 1,5 мм - 1 раз в 10 дней
- Курс 10 процедур

# КОСМЕТИКА ВТЕСН

## ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ И УХОДА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР

КОД	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ	СРЕДСТВО	ДЕЙСТВИЕ
53815	Подготовка кожи к процедуре	Ферментативный скраб-гоммаж для лица	Мягкое абразивное действие для мягкого пилинга, улучшает проникновение активных компонентов.
00201	Антивозрастные программы и уменьшение объемов лица и тела	Мезококтейль для лифтинга и придания формы 7×3мл LIFTING AND SHAPING	Моделирования овала лица Lifting and Shaping Serum, лицо приобретает четкий овал, кожа разглаживается и становится упругой и эластичной. Средство обладает мощным подтягивающим эффектом, формирует контуры лица, морщины разглаживаются.
00202	Антивозрастные программы, уменьшение мимических морщин	Мезококтейль антиоксидантное омоложение 7×3мл Regenerating Coenzyme Q10	Вызывает выработку факторов роста в кератиноцитах, которые усиливают синтез коллагена и эластина в дерме, благодаря чему омолаживает матрицу кожи. Витамин Е помогает регенерации и обновлению клеток, уменьшает пигментацию, улучшает насыщение клеток кислородом, помогает поддерживать уровень влаги и способствует повышению упругости.
00210	Антивозрастные программы, сужение пор, выравнивает микрорельеф	Мезококтейль для восстановления и регенерации кожи 7×3мл MTS UNFUSION SERUM	DermCom™ – технология основана на экстракте луковицы крокуса золотистого <i>Crocus chrysanthus</i> и способна повернуть вспять процесс старения, стимулируя общение между клетками кожи. Вызывает выработку факторов роста в кератиноцитах, которые усиливают синтез коллагена и эластина в дерме, благодаря чему омолаживает матрицу кожи.
00211	Интенсивное омоложение, увлажнение кожи	Мезококтейль для омоложения кожи 7×3мл SKIN REJUVENATE ESSENCE APPLE	Предотвращает потерю воды и восстанавливает кожный барьер. Проникает быстрее, чем гидролизированный коллаген и увлажняет быстрее. Обладает антиоксидантным эффектом, и дольше работает, т.к. не окисляется. DermCom™ – технология основана на экстракте луковицы крокуса золотистого <i>Crocus chrysanthus</i> и способна повернуть вспять процесс старения, стимулируя общение между клетками кожи. Вызывает выработку факторов роста в кератиноцитах, которые усиливают синтез коллагена и эластина в дерме, благодаря чему омолаживает матрицу кожи.
00214	Успокаивает раздраженную кожу, интенсивно увлажняет, защищает от УФ лучей	Мезококтейль снижающий чувствительность кожи 7х3мл SENSITIVITY SMOOTHING ESSENCE	Moist 24™ – за счет активного ингредиента экстракта растения императы цилиндрической интенсивно и длительно увлажняет сухую кожу, мгновенно увеличивая гидратацию кожи на 60% и сохраняя ее на уровне 50% в течении 6 часов после применения. Делает кожу более нежной, гладкой и эластичной. Symbiocell™ – регулирует уровень чувствительности кожи путем контроля дендритных клеток, функция которых заключается в презентации «вражеских» антигенов другим клеткам иммунной системы, чтобы они реагировали адекватно при проблеме
00215	Успокаивает воспалительную кожу, предотвращает избыточное выделение кожного сала.	Мезококтейль против акне и несовершенств 7х3мл ANTI ACNE	Ac.net™ – радикальный косметический ингредиент действующий на все причины Акне. Полностью побеждает прыщи, устраняя гиперсеборею, гиперкератоз, воспаление и пролиферацию (размножение) бактерий. Обладает противовоспалительным, противоопухолевым и антимикробным свойствами, ингибирует 5-α редуктазу, что предотвращает избыточное выделение кожного сала.

00216	Против темных кругов под глазами	Мезококтейль против темных кругов 7x3мл RADIANCE CLEAR EYE SOLUTION	HaloxyL™ – технология укрепляет и делает однородным цвет кожи вокруг глаз, устраняет темные круги.
00217	Уменьшает отек лица и век, осветляет кожу, уменьшает мешки под глазами	Мезококтейль против мешков 7x3мл EYE DE-PUFFING DETOX FLUID	Eyesseril™ – универсальный пептид для ухода за кожей вокруг глаз, снимает отек, улучшает эластичность, препятствует гликации, осветляет (дипигментирует). Помогает улучшить контур глаз за счет снижения ключевых факторов образования мешков под глазами
00227	Осветляет кожу, уменьшает пигментные пятна, выравнивает тон лица	Мезококтейль для осветления и выравнивания тона 7x3мл BRIGHTENING	Brighlette™ – технология снижает производство и отложение меланина в коже путем воздействия на ключевые шаги процесса пигментации: регулирует экспрессию сигнальных белков меланогенеза, снижает активность тирозиназы, а также уменьшает поглощение меланина кератиноцитами.
53245	Успокаивает кожу, снимает покраснение после процедур	Успокаивающий гель после косметологической процедур 200мл DERMASOFT	Интенсивно успокаивающий гель для чувствительной кожи, раздраженной после процедур эстетической медицины и косметологии: микродермабразии, мезотерапии, электрокоагуляции, пилинга, радиоволн.

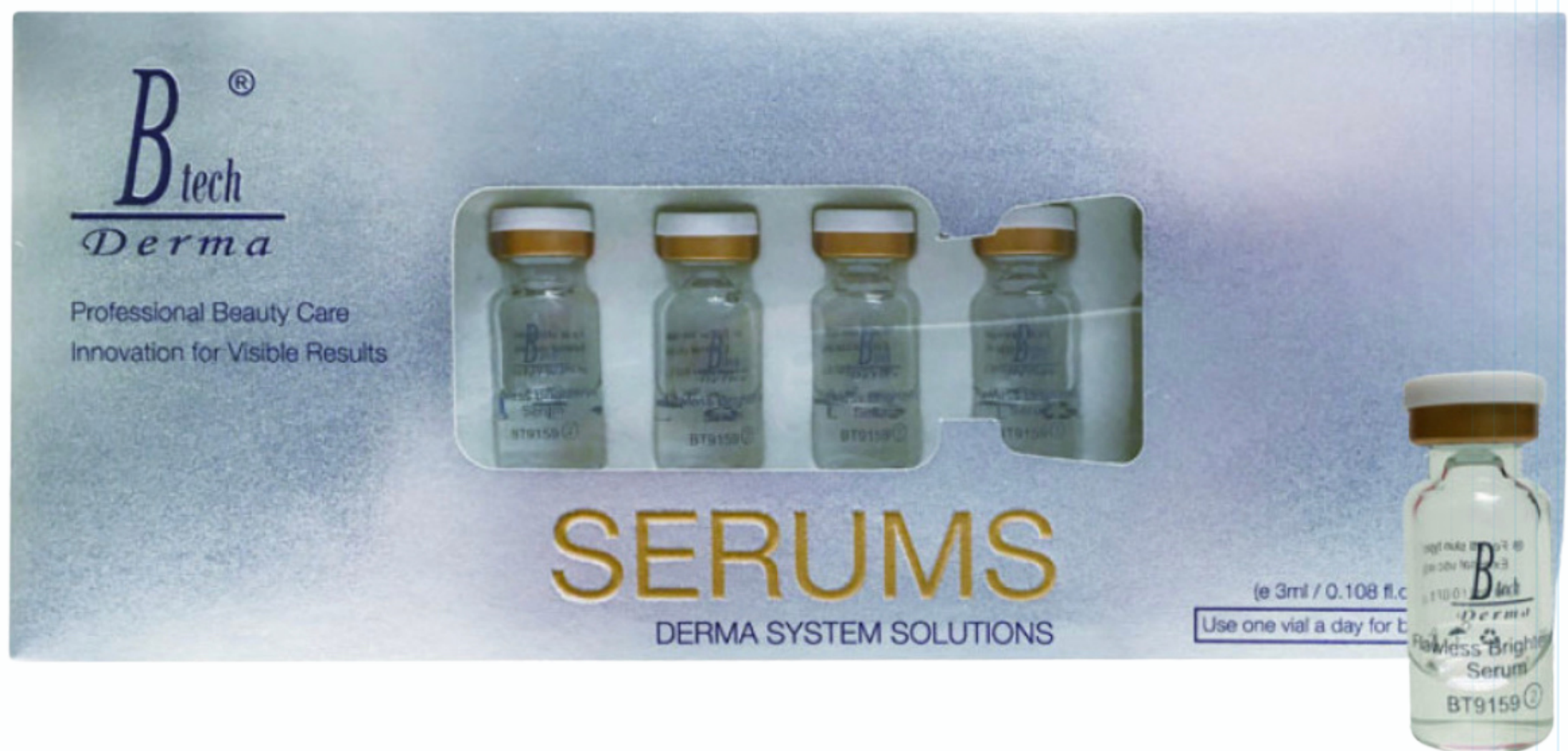

# МЕЗОКОКТЕЙЛИ

## ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

● Применяются во время или непосредственно после процедуры

СОСТАВЫ МЕЗОКОКТЕЙЛЕЙ	ДЕЙСТВИЕ
DermCom™	технология основана на экстракте луковицы крокуса золотистого <i>Stocus chrysanthus</i> и способна повернуть вспять процесс старения, стимулируя общение между клетками кожи. Вызывает выработку факторов роста в кератиноцитах, которые усиливают синтез коллагена и эластина в дерме, благодаря чему омолаживает матрицу кожи.
Коэнзим Q10 (убихинон)	является важным компонентом энергетического обмена в клетках, играет важную роль в качестве антиоксиданта, защищает от фотостарения. Путем стимуляции митохондриальной активности способствует омоложению кожи, стимулирует выработку коллагена.
Витамин E	помогает регенерации и обновлению клеток, уменьшает пигментацию, улучшает насыщение клеток кислородом, помогает поддерживать уровень влаги и способствует повышению упругости, борется со свободными радикалами.
D-пантенол	основное свойство которого, способность быстро обеззараживать и заживлять, снимать воспаление и ускорять эпителизацию. Благодаря своей гигроскопичности и высокой проницаемости, пантенол проникает в глубокие слои кожи, «уводя» за собой молекулы воды.
Etioline™	борьба с пигментными пятнами
PhytoCellTec™ Malus Domestica	данная технология обеспечивает долговечность собственных стволовых клеток кожи человека, защищая их от повреждений, борется с хронологическим старением, повышает регенеративный потенциал кожи.
Ameliox™	уменьшение морщин и улучшение упругости кожи лица
Hyactive™	повышение эластичности и обновление клеток кожи
Eyeseril™	универсальный пептид для ухода за кожей вокруг глаз, снимает отек, улучшает эластичность, препятствует гликации, осветляет (дипегментирует). Помогает улучшить контур глаз за счет снижения ключевых факторов образования мешков под глазами
Ac.net™	полностью побеждает прыщи, устраняя гиперсеборею, гиперкератоз, воспаление и пролиферацию (размножение) бактерий.
Олеаноловая кислота	обладает противовоспалительным, противоопухолевым и антимикробным свойствами, ингибирует 5-α редуктазу, что предотвращает избыточное выделение кожного сала.
Keratoline™	тщательно удаляет отмершие клетки эпидермиса и стимулирует обновление клеток кожи.
Fucogel™	увлажняющий мультикомплексный актив, тонизирует кожу, образует на коже защитную пленку, проницаемую для воздуха, обеспечивает увлажнение, которое особенно ярко выражено через некоторое время после нанесения



# УСПОКАИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР APIS



- УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ПОСЛЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
- 50МЛ
- DERMASOFT



- УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ПОСЛЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
- 200МЛ
- DERMASOFT



- АЛЬГИНАТНАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
- 250Г
- TROPICAL RELAX

# НАШИ КОНТАКТЫ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР: "ПРОФ УНИВЕРСАЛ"



8-987-436-8290



DPOPROF@VK.RU



[HTTPS://DPOPROF.COM/](https://dpoprof.com/)



Г. САМАРА, УЛ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ 180



**ПРОФ УНИВЕРСАЛ**