

Таблица

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ И РЕЖИМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ  
ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТОВ**

| Название       | Концентрация | Температура рабочего раствора, °С<br>(НЕ менее) | Время обработки, мин. |   |                               | Вид изделия  |
|----------------|--------------|---|-----------------------|---|-------------------------------|--|
|                |              |   | Замачивание           | Мойка в том же растворе, в котором осуществлялось замачивание | Ополаскивание проточной водой |  |
| АЛАМИНОЛ       | 5            | 18  | 60                    | 0,5-1   | 3                             | Изделия из стекла, пластмасс, металла, исключая углеродистую сталь           |
| ЛИЗЕТОЛ АФ     | 5            | 18  | 15                    | 0,5-1   | 1                             | Изделия из металла, стекла, пластмассы, резины                               |
| ВЕЛТОЛЕН       | 2,5          | 18  | 60                    | 0,5-1   | 1                             | Изделия из металла, стекла, пластмассы, резины                               |
| ДЕЗЭФФЕКТ      | 3:128        | 50 (не поддерживается)                          | 60                    | 0,5-1   | 3                             | Изделия из металла, стекла, пластмассы, резины, кроме имеющих замковые части |
| СЕПТОДОР-ФОРТЕ | 0,4          | 18  | 60                    | 1   | 3-5                           | Изделия из металла, стекла, пластмасс, резины                                |

